

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

*Horno de sinterización*

**e.ON**  
*sinter fast*



Rév 301121

**UGIN DENTAIRE**

25 rue de la Tuilerie • 38170 Seyssinet-Pariset • FRANCE

Tél. : (+33) 4 76 84 45 45 • [info@ugin-dentaire.fr](mailto:info@ugin-dentaire.fr) • [export@ugin-dentaire.fr](mailto:export@ugin-dentaire.fr)

[ugindentaire.fr](http://ugindentaire.fr)  


# e.ON sinter fast

A.	DESCRIPCION DEL EQUIPO .....	2
B.	MANUAL DE INSTRUCCIONES.....	3
1.	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD .....	3
1.1.	UTILIZACION .....	3
1.2.	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD .....	3
1.3.	GESTION DE RESIDUOS .....	5
2.	DECLARACION DE CONFORMIDAD CE .....	5
3.	CARACTERISTICAS.....	6
3.1.	CARACTERISTICAS TECNICAS .....	6
3.2.	CONDICIONES DE UTILIZACION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO .....	7
3.3.	ACCESORIOS .....	7
4.	INSTALACION .....	8
4.1.	DESEMBALAJE.....	8
4.2.	INSTALACION .....	8
5.	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO .....	9
6.	UTILIZACION .....	9
6.1.	MENU “CICLO ACTUAL” .....	9
6.2.	TECLAS DE CONTROL .....	10
6.3.	MENU “DIAGRAMA DE CICLO ACTUAL” (REAL-TIME CURVE) .....	11
6.4.	MENU “PARÁMETROS DEL PROGRAMA” (PROGRAM EDITOR) .....	11
6.4.1.	MODIFICACION DE LOS PARAMETROS .....	11
6.4.2.	INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION .....	12
6.4.2.1.	EJEMPLOS DE CALCULO.....	13
6.5.	MENU “PARÁMETROS TÉCNICOS” (PARAMETER SETTING) .....	13
6.6.	PROGRAMAS.....	14
6.6.1.	PROGRAMA PROGRAMADO N° 1 (para 1 a 2 elementos individuales) .....	14
6.6.2.	PROGRAMA PROGRAMADO N° 2 (para 2 a 5 elementos individuales) .....	14
6.6.3.	PROGRAMA PROGRAMADO N° 40 – PROGRAMA DE DESCONTAMINACION .....	15
6.7.	COLOCAR LOS ELEMENTOS E INICIAR EL CICLO .....	16
6.7.1.	COLOCAR EL SOPORTE DE COCCIÓN.....	16
6.7.2.	COLOCAR LOS ELEMENTOS Y EL CRISOL DE SINTERIZACIÓN.....	16
6.7.3.	CIERRE DE LA BANDEJA E INICIO DEL CICLO.....	17
6.7.4.	SECUENCIA DEL INICIO DEL CICLO .....	17
7.	CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO .....	18
8.	MANTENIMIENTO.....	20
8.1.	REPLAZO DEL ELEMENTO CALEFACTOR.....	21
8.2.	RESOLUCION DES PROBLEMAS .....	22

*Imágenes no contractuales*

*Traducción en español del original en francés*

**A. DESCRIPCION DEL EQUIPO**

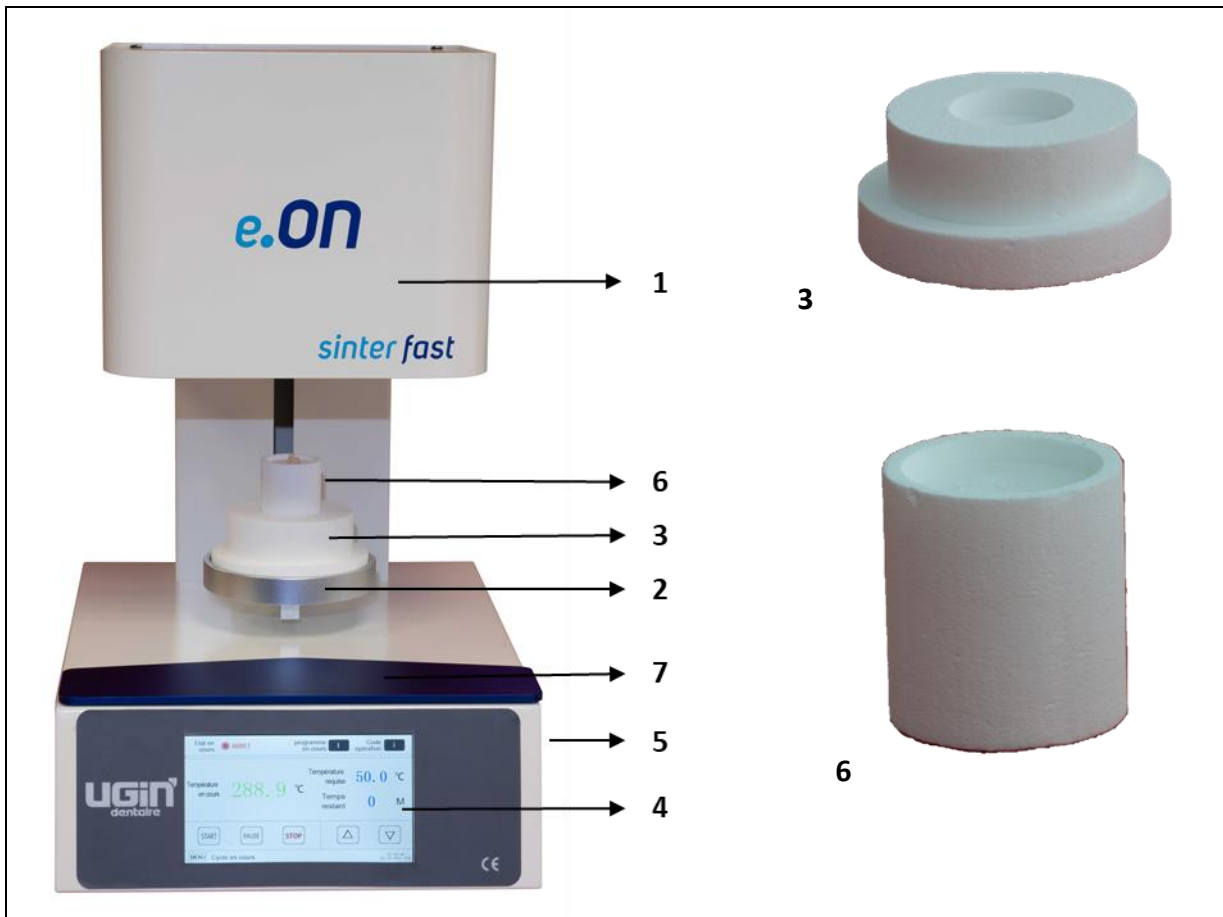

N°	DESCRIPCION
1	Parte superior del horno
2	Bandeja
3	Soporte de cocción
4	Pantalla táctil
5	Disyuntor encendido/apagado ( <i>lado trasero</i> )
6	Crisol de sinterización
7	Soporte magnético para depositar los trabajos protésicos

## B. MANUAL DE INSTRUCCIONES

### 1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

#### 1.1. UTILIZACION

e.ON sinter fast es un horno de sinterización para la producción rápida de elementos individuales, para prótesis dentales en óxido de circonio ( $ZrO_2$ ). Este horno solo puede ser utilizado por profesionales de prótesis dentales.

e.ON sinter fast debe usarse bajo las condiciones y para los usos descritos en este manual. Cualquier otro uso que se haga (como cocinar otros materiales, calentar productos alimenticios, etc.) se considera inapropiado. En este caso, el fabricante declina toda responsabilidad y cancela inmediatamente la garantía del equipo.




Dadas las instrucciones a respetar y las múltiples funcionalidades del producto, es imperativo leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar. Conservarlo para futuras referencias.




#### 1.2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Significado de los pictogramas utilizados en el manual de instrucciones:

	Peligro general		Peligro eléctrico		Peligro de quemaduras – superficie caliente
--	-----------------	--	-------------------	--	---

Respetar las siguientes instrucciones de seguridad:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el funcionamiento y tras su utilización, <b>la superficie de la tapa superior et de la bandeja, el soporte de cocción y el crisol de sinterización pueden alcanzar temperaturas elevadas: no tocar.</b></li> <li>- Utilizar guantes adecuados para manipular los elementos protésicos, el crisol de sinterización y el soporte de cocción.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El horno debe enchufarse obligatoriamente a una <b>instalación eléctrica que cumpla con la normativa</b> vigente en el país de utilización. Esta instalación debe estar <b>equipada de protecciones contra las sobre-corrientes, sobre-tensiones y defectos de conexión a tierra.</b></li> <li>- <b>Este horno necesita su propia línea eléctrica conectada a un disyuntor. La conexión a tierra es obligatoria.</b></li> <li>- <b>Conectar el enchufe directamente a la red eléctrica.</b> No utilizar enchufes múltiples.</li> <li>- Asegurarse del buen estado de los <b>cables de conexión</b> para evitar riesgos de corto-circuito.</li> <li>- Antes de efectuar cualquier tipo de <b>intervención técnica</b>, es obligatorio apagar el horno (a través del disyuntor) y desconectarlo de la corriente.</li> <li>- <b>No derramar líquidos</b> sobre las rejillas de ventilación ni en el interior del horno.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar que <b>ningún objeto bloquea el desplazamiento de la bandeja.</b> Ello puede provocar un fallo del aparato y dañar ciertos componentes.</li> <li>- El horno debe colocarse sobre una <b>superficie plana</b>, conservando alrededor un espacio suficiente para <b>asegurar la ventilación necesaria (ver capítulo 4.2).</b></li> <li>- <b>No obstruir el sistema de ventilación</b> para evitar el riesgo de sobrecalentamiento.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Para desplazar el horno:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- sujetarlo por la base: <b>JAMÁS LEVANTARLO POR LA PARTE ALTA DEL HORNO,</b></li><li>- el horno debe estar siempre en posición vertical: <b>NO TUMBAR.</b></li><li>- no deje ningún accesorio ni el soporte en la cámara de calentamiento.</li></ul></li><li>- <b>Nunca utilizar el horno sin soporte de cocción.</b></li><li>- Utilizar exclusivamente el <b>soporte de cocción, recipiente y tapa de sinterización</b> de marca UGIN DENTAIRE. Antes de utilizar, comprobar si se encuentra en perfecto estado (sin polvo/suciedad o daños). <b>Si dañado o roto: no utilizar.</b></li><li>- <b>Respetar las indicaciones para colocar el soporte de cocción y el crisol</b> (<i>ver capítulo 6.7</i>): riesgo de daños materiales.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>La cámara de calentamiento contiene fibras cerámicas refractarias.</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Manejar con precaución.</b></li><li>- <b>Pueden liberar polvo: retirar con una aspiradora - no soplar ni utilizar aire comprimido</b></li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utilizar únicamente <b>piezas de repuesto originales UGIN DENTAIRE</b>. La utilización de piezas de repuesto no originales anula la eventual garantía de la cual se beneficia el equipo.</li><li>- <b>No introducir nunca objetos al interior del equipo</b> durante las tareas de mantenimiento. Está prohibido modificar el equipo sin autorización.</li><li>- <b>No efectuar tareas de mantenimiento diferentes</b> a las indicadas en este manual. Cualquier intervención no prevista en la documentación puede resultar peligrosa.</li><li>- Para cualquier información sobre la instalación, el mantenimiento o la utilización del equipo, consultar con el <b>servicio técnico UGIN DENTAIRE</b>.</li></ul>

### 1.3. GESTION DE RESIDUOS

Respetar las instrucciones de eliminación específicas para los equipos eléctricos y electrónicos: no desechar junto con la basura doméstica.

El equipo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y a la legislación del país en el que se utiliza, y debe eliminarse de acuerdo con las disposiciones en vigor.

La cámara de calentamiento contiene fibras cerámicas refractarias: deben eliminarse de acuerdo con las disposiciones en vigor.

## 2. DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

La déclaration de conformité CE de l'équipement est fournie en annexe du mode d'emploi.

### Contenu de la déclaration CE :

- Razón social y dirección del fabricante:  
UGIN DENTAIRE  
25 rue de la Tuilerie 38170 SEYSSINET-PARISSET – France
- UGIN DENTAIRE declara, bajo su sola responsabilidad, que el producto:
  - Horno de sinterización e.ON sinter fast
  - Número de serie: *indicado en la declaración CE de conformidad del equipo*
- Responde a las exigencias de salud y seguridad de las siguientes directivas:
  - Directiva máquina 2006/42/CE
  - Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

### 3. CARACTERISTICAS

#### 3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS

e.ON sinter fast es un horno de sinterización para prótesis dentales en óxido de circonio. Este horno solo puede ser utilizado por profesionales de prótesis dentales y en las condiciones previstas a tal fin (*ver capítulos 1.1 et 3.2*).

<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>	
<b>Temperatura máxima</b>	1 750°C
<b>Precisión de la temperatura</b>	± 1°C
<b>Velocidad de calentamiento</b>	Máxima de hasta 65°C/minuto
<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil a color 7" (155mm x 87mm) de alta definición
<b>Numero de programas</b>	40 programas (con 40 tramos posibles)
<b>Numero de elemento calefactores</b>	1 en MoSi <sub>2</sub> ( <i>Disiliciuro de Molibdeno</i> )
<b>Sensor</b>	Thermopar doble componente Pt/Rh ( <i>Platino/Rodio</i> )
<b>Dimensiones del horno</b> (altura, anchura, profundidad)	550mm x 330mm x 430mm
<b>Peso</b>	29 Kg
<b>Espacio disponible para los elementos</b> (altura, diámetro)	30mm x 35mm en el crisol
<b>Potencia máxima</b>	2 kW
<b>Tensión</b>	230 V (50/60 Hz)

### 3.2. CONDICIONES DE UTILIZACION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

#### ▪ Condiciones de utilización autorizadas

- Temperatura ambiente: +10°C hasta +40°C
- Intervalo de humedad: máxima humedad relativa del aire 80% para temperaturas de hasta 31°C, decreciendo linealmente hasta 50% de humedad relativa a 40°C, excluida condensación
- Presión ambiente: altitudes de hasta de 2000 m

#### ▪ Condiciones de almacenamiento autorizadas

- Temperatura ambiente: -20°C hasta +65°C
- Intervalo de humedad: máxima humedad relativa del aire 80%
- Presión ambiente: altitudes de hasta de 2000 m

#### ▪ Condiciones de transporte autorizadas

- Esperar el enfriamiento total del horno antes de proceder al embalaje y transporte.
- Utilizar únicamente el embalaje original y los elementos de protección (*espuma de poliestireno...*).
- Para desplazar el horno sujetarlo por la base, jamás por la parte alta del horno.
- Durante el transporte, el horno debe estar siempre en posición vertical: no tumbar.
- Colocar el horno en el embalaje y poner los elementos de protección. Proteger también los accesorios durante el transporte.
- Durante el transporte, no deje piezas móviles (incluidos los accesorios y el soporte) en la cámara, podrían dañar el elemento calentador.



**JAMAS LEVANTAR EL HORNO POR LA PARTE ALTA DEL HORNO:** riesgo de daños materiales.

Durante el transporte, el horno debe estar siempre en posición vertical: **NO TUMBAR**.

El elemento calefactor puede sufrir daños en posición horizontal debido a las vibraciones/choques.

### 3.3. ACCESORIOS

#### ▪ Lista de accesorios (incluidos en el embalaje):

ACCESORIOS	CANTIDAD	CODIGO UGIN
- Crisol de sinterización	2	FCE07SIN0079
- Envase de perlas de circonio	1	FCE03SIN0001
- Soporte de cocción	1	FCE07SIN0078
- Llave plana (n°8 y 10)	1	---
- Fusible 6A	1	FCE05ELC0082
- Fusible 32A	1	FCE05ELC0083
- Soporte magnético	1	---



## 4. INSTALACION

### 4.1. DESEMBALAJE

- Comprobar al desembalar que el horno **e.ON sinter fast** y los accesorios se encuentra en perfecto estado.
- Señalar al transportista los eventuales deterioros: anotar las reservas en el albarán de transporte.
- Asegurarse de que el transportista firma el documento de transporte.

*NOTA: conservar el embalaje original y los elementos de protección para eventuales transportes (ver capítulo 3.2).*

### 4.2. INSTALACION

- Instalar el horno en un local ventilado. Respetar las condiciones indicadas en el capítulo 3.2.
- Colocar el horno sobre una superficie plana y ventilada, dejando libre un espacio de al menos 25 cm a su alrededor. Instalarlo alejado de fuentes de calor (radiadores y/u otros equipos que emiten calor). Evitar las vibraciones y los choques.
- A pesar del buen aislamiento térmico del que dispone, el horno emite calor y puede decolorar las superficies cercanas a largo plazo.
- No agitar el horno, evitar las vibraciones y los choques.
- El elemento calefactor en Disiliciuro de molibdeno es muy frágil a temperatura ambiente: EVITAR SU MANIPULACIÓN. Evitar el desplazamiento del horno tras su instalación.
- El polvo, los gases corrosivos o explosivos pueden dañar la carrocería y el material de aislamiento.
- El horno no debe instalarse ni utilizarse en un lugar donde existe riesgo de explosión.
- Prohibido acercar al horno productos inflamables, tóxicos, volátiles o explosivos.



**Este equipo necesita su propia línea eléctrica conectada a un disyuntor.**

**La conexión a tierra es obligatoria** para evitar accidentes y peligros relacionados con el sobrecalentamiento de la línea eléctrica y el riesgo de parásitos.

A causa de su potencia, **conectarlo directamente a la red eléctrica**, no utilizar enchufes múltiples.

## 5. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Tras comprobar que la tensión de la red es la misma que la indicada en la placa de identificación, conectar el cable de alimentación a una **toma de corriente 20A** equipada con un terminal de conexión a tierra, o, como se recomienda, **directamente en una línea de 20A como mínimo del cuadro eléctrico**.

*NOTE: desconectar el horno de la red eléctrica si no se usa durante un largo período de tiempo.*

- Accionar el disyuntor (encendido/apagado) situado en el lado trasero del horno.


- Al activarse el horno, la interfaz de inicialización aparece en la pantalla. Después, la pantalla principal se muestra así: **menú "ciclo actual"**.

*Nota:*

*Unidad de la temperatura: grados Celsius (°C)*

*Unidad del tiempo: minutos (M)*



- **Baje la bandeja:** pulse el botón "flecha hacia abajo" en la pantalla táctil 
- **Retirar las protecciones** colocadas en la bandeja y al interior de la cámara de calentamiento.
- Limpiar el polvo con un aspirador (no utilizar aire comprimido).
- Controlar visualmente el estado del elemento calefactor.
- Al utilizar el horno por primera vez, pulsar la tecla "*ascenso bandeja*" y la tecla "*descenso bandeja*"
- Comprobar la alineación de la bandeja con la base de la cámara de calentamiento. El movimiento debe efectuarse sin fricción.
- Coloque el soporte magnético en la base del horno.
- No coloque ningún objeto alrededor de la bandeja que pueda obstaculizar su movimiento o caerse, lo que podría dañar el horno o provocar una avería.
- Coloque el soporte en la bandeja.



**NO COLOCAR NINGÚN OBJETO QUE PUEDA BLOQUEAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA BANDEJA (SUBIDA / BAJADA)**



### IMPORTANTE


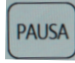

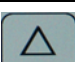
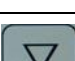





- **Antes de utilizar por primera vez el horno, se debe realizar un ciclo de descontaminación como medida de precaución:** inicie el programa número 40 pregrabado (*ver capítulo 6.6.1*).
- **Después de un periodo sin utilizar el horno, es necesario precalentar la mufla** para eliminar la condensación y evitar fracturas del material refractario: **lanzar un ciclo de descontaminación** (programa número 40 pregrabado).

## 6. UTILIZACION

### 6.1. MENU "CICLO ACTUAL"

Al activarse el horno, la interfaz de inicialización aparece en la pantalla. Después, la pantalla principal aparece: **menú "ciclo actual"**.

## 6.2. TECLAS DE CONTROL

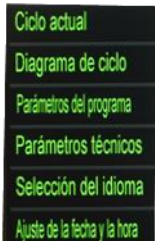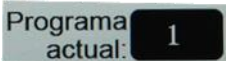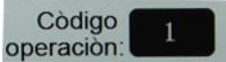
ICONO	TECLA	DESCRIPCION
	<b>Inicio del ciclo</b> (MARCHA)	Inicio del programa seleccionado.
	<b>Pausa</b> (PAUSA)	Durante el ciclo, el programa se interrumpe y queda en espera, la temperatura se mantiene al nivel alcanzado.
	<b>Parada</b> (STOP)	Durante el ciclo o en pausa, el programa se detiene.
	<b>Ascenso de la bandeja</b> (FLECHA HACIA ARRIBA)	Al pulsar la bandeja asciende. Al pulsar por segunda vez, la bandeja se detiene a la altura deseada.
	<b>Descenso de la bandeja</b> (FLECHA HACIA ABAJO)	Al pulsar la bandeja desciende. Al pulsar por segunda vez, la bandeja se detiene a la altura deseada. <i>NOTA: si la <u>temperatura es superior a 300°C, no es posible lanzar un ciclo (riesgo de daños del material refractario). En este caso, pulsar la tecla de descenso de la bandeja (FLECHA HACIA ABAJO): un mensaje de alerta aparece en la barra de estado (parte inferior de la pantalla).</u></i>
 	<b>Menú</b> (MENU o logo Microsoft)	Un menú desplegable aparece en la pantalla, compuesto de los 6 elementos siguientes:
	<b>Ciclo actual</b> (Working interface)	Visualización de los parámetros del ciclo actual.
	<b>Diagrama de ciclo</b> (Real-time curve)	Visualización de la curva del ciclo (temperatura/tiempo).
	<b>Parámetros del programa</b> (Program editor)	Configuración de los programas.
	<b>Parámetros técnicos</b> (Parameter setting)	Configuración del software. Acceso únicamente con una contraseña (reservado al servicio técnico UGIN DENTAIRE).
	<b>Selección del idioma</b> (Language selection)	Idiomas disponibles: francés, inglés, español e italiano.
	<b>Ajuste de la fecha y hora</b> (Date setting)	Ajuste de la fecha, la hora y el día de la semana.
	<b>Programa actual</b>	Número del programa grabado que se iniciará o que está en curso.
	<b>Código operación</b>	Este código es un seguimiento del progreso del ciclo. Se visualiza según los tramos programados (código de operación n° 1: tramo 1°; código de operación n° 2: tramo 2°; etc.). Al iniciar el ciclo, compruebe que el código de operación es el 1.

### 6.3. MENU "DIAGRAMA DE CICLO ACTUAL" (REAL-TIME CURVE)

Esta pantalla muestra el diagrama del ciclo actual (tiempo/temperatura).

En la pantalla se observan dos curvas: la temperatura programada en el ciclo (curva azul) y la temperatura alcanzada en tiempo real (curva verde).

La curva verde aparece con la curva azul superpuesta a durante la regulación de temperatura.

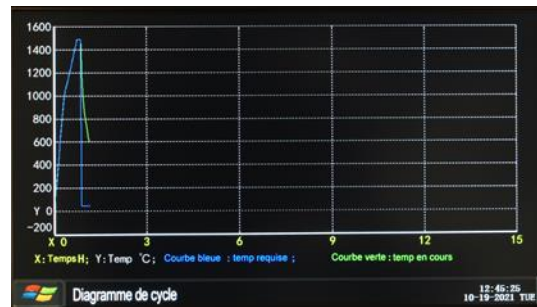

### 6.4. MENU "PARÁMETROS DEL PROGRAMA" (PROGRAM EDITOR)

Este menú permite la configuración de los programas: 40 programas compuestos de 40 pares temperatura/tiempo.

Para seleccionar un programa, utilizar las flechas "derecha" e "izquierda": los números de los programas desfilan en la pantalla.

Por cada programa los parámetros del ciclo se muestran en la pantalla en forma de tabla:

- C representa la temperatura (°C), y
- T representa el tiempo (minutos).

C01	50.0	C06	0.0	C11	0.0	C16	0.0
T01	20	T06	0	T11	0	T16	0
C02	1000.0	C07	0.0	C12	0.0	C17	0.0
T02	30	T07	0	T12	0	T17	0
C03	1490.0	C08	0.0	C13	0.0	C18	0.0
T03	10	T08	0	T13	0	T18	0
C04	1490.0	C09	0.0	C14	0.0	C19	0.0
T04	-121	T09	0	T14	0	T19	0
C05	0.0	C10	0.0	C15	0.0	C20	0.0
T05	0	T10	0	T15	0	T20	0

Cada programa está formado por dos páginas: la primera página muestra los pares del C01/T01 al C20/T20 y la segunda página, del C21/T21 al C40/T40. Pulsar la tecla "PAGINA SIGUIENTE" para pasar de la primera a la segunda página.

#### 6.4.1. MODIFICACION DE LOS PARAMETROS

Una vez seleccionado el número del programa, pulse sobre el parámetro a modificar. Un teclado numérico aparece en la pantalla.

Introduzca el nuevo valor mediante el teclado numérico y pulse el botón "OK" para guardar.

Un mensaje de confirmación aparece:

**"Advertencia: pulse la tecla "Ok" y los datos se guardarán".**

Pulse "Ok" para confirmar o "Cancelar" para anular.



Tras realizar todas las modificaciones deseadas en el programa, pulse el botón "GUARDAR" para guardar el programa completo.

Tras la validación, la pantalla "ciclo actual" aparece de nuevo en la pantalla.

## 6.4.2. INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION

C: Temperatura en grados Celsius (°C)

T: Tiempo en minutos (min)

<b>Temperatura 1</b>	Utilizado como valor de la <u>temperatura inicial</u> (en general, ajustado a 50).
<b>Tiempo 1</b>	Período total del primer tramo (0 a 9999 minutos).
<b>Temperatura 2</b>	Temperatura final del primer tramo y temperatura inicial del segundo tramo. El valor debe ser <b>inferior a 65°C/min, hasta los 1 000°C</b> .
<b>Tiempo 2</b>	Período total del segundo tramo (0 a 9999 minutos).
<b>Temperatura 3</b>	Temperatura final del segundo tramo e inicial del tercer tramo. Si C3 es inferior a C2 ( <u>descenso de temperatura</u> ).
<b>Tiempo 3</b>	Período total del tercer tramo (0 a 9999 minutos).
<b>Temperatura 4</b>	Temperatura final del tercer tramo e inicial del cuarto tramo. Si es necesario, los parámetros se programan como en los pasos anteriores.
La última indicación de tiempo "121"	indica el final del programa, el control de temperatura funciona según los parámetros temperatura/tiempo. Cuando el programa detecta el valor "-121", el comando STOP se activa con el retorno al programa seleccionado previamente. "-121". También indica una correcta ejecución del ciclo.

**ADVERTENCIA:** El operador debe establecer para cada tramo la temperatura/tiempo inicial y la temperatura/tiempo final. Estos datos deben ser calculados a partir de la velocidad de ascenso/descenso deseado, siguiendo las recomendaciones dadas (ver a continuación dos ejemplos de cálculo).  
Nunca escribir directamente en la pantalla la velocidad deseada, el software no puede realizar los cálculos necesarios y tomará el valor como una temperatura o un tiempo determinado.



**IMPORTANTE:** terminar siempre con el tiempo "-121", sino el ciclo no se terminará

### 6.4.2.1. EJEMPLOS DE CALCULO

#### ▪ Cálculo de la duración del segundo tramo (T01)

A partir de los valores de temperatura inicial y final del segundo tramo, cálculo de la duración del tramo:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Temperatura 1} \rightarrow \text{C01} = 50^{\circ}\text{C} \\ \text{Temperatura 2} \rightarrow \text{C02} = 1000^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Diferencia de temperatura:} \\ \text{C02} - \text{C01} = 1000^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C} = 950^{\circ}\text{C} \end{array}$$

Velocidad de ascenso de 47,5°C/minuto

$$950^{\circ}\text{C a razón de } 47,5^{\circ}\text{C/min} \rightarrow 950^{\circ}\text{C} / 47,5^{\circ}\text{C} = 20 \text{ min} \rightarrow \text{T01} = 20 \text{ minutos}$$

#### ▪ Parámetros para el mantenimiento a la temperatura final (T03) o a una temperatura determinada (tramo de mantenimiento intermedio)

Parámetros temperatura/tiempo del último tramo para obtener un mantenimiento a la temperatura final de 1490°C durante 10 minutos:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Temperatura 2} \rightarrow \text{C02} = 1490^{\circ}\text{C} \\ \text{Temperatura 3} \rightarrow \text{C03} = 1490^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Diferencia de temperatura} = 0^{\circ}\text{C:} \\ \text{mantenimiento de la temperatura a } 1490^{\circ}\text{C} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Tiempo de mantenimiento: } 10 \text{ minutos} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Tiempo } \textit{T03}: 10 \text{ minutos} \\ \rightarrow \text{T03} = 10 \text{ minutos} \end{array}$$



Las **TEMPERATURAS DE SINTERIZACIÓN** proporcionadas por los fabricantes de discos de circonio son indicativas, se **pueden ajustar entre -15°C y hasta +50°C** en comparación con la temperatura final recomendada si necesario.

**Se recomienda ajustar la temperatura/tiempo para trabajos especiales y realizar a una prueba para confirmar los resultados deseados.**

### 6.5. MENU "PARÁMETROS TÉCNICOS" (PARAMETER SETTING)

Este menú requiere una contraseña para acceder.

**Ningún dato debe modificarse sin autorización:** riesgo de daños en el equipo o activación de calentamientos inopinados.

**Acceso reservado al servicio técnico UGIN DENTAIRE.**

Cette interface nécessite un mot de passe pour être accessible.

HIAL	1620	M5	489.7	dIL	0	oPH	100
LoAL	200	P	5	dIH	1800	CF	16
dHAL	999.9	t	6	ALP	5503	STATE	12
dLAL	999.9	CtI	1	Sc	0	ID	1
dF	0.3	Sn	6	OP1	4	dL	1
Ctrl	3	dIP	0	oPL	64	run	2

**NOTA:** Incluso si se realizan cambios en los parámetros, al guardarlos, en la pantalla aparece un teclado numérico para introducir la contraseña. Si no se introduce ninguna contraseña y se valida pulsando la tecla "OK", los cambios realizados no se guardan y los parámetros iniciales siguen siendo aplicables.

## 6.6. PROGRAMAS

El horno presenta tres ciclos programados: el n° 1 y el n° 2 son programas rápidos, y el n° 40 es un ciclo de descontaminación. Los programas n° 1 y 2 se dan como ejemplos.



**ATENCIÓN:** siga las instrucciones del fabricante del circonio utilizado para comprobar la compatibilidad con la realización de un programa rápido y el número máximo de elementos en ciclo rápido.

Siga sus instrucciones para la programación del ciclo dentro de los límites técnicos del e.ON sinter fast (el valor de la rampa de temperatura debe ser inferior a 65°C/min hasta 1000°C).

Compruebe con el diagrama del ciclo que el horno sigue correctamente la curva de temperatura requerida.

### 6.6.1. PROGRAMA PROGRAMADO N° 1 (para 1 a 2 elementos individuales)

C01	50,0	C06	0,0	C11	0,0	C16	0,0
T01	20	T06	0	T11	0	T16	0
C02	1000,0	C07	0,0	C12	0,0	C17	0,0
T02	30	T07	0	T12	0	T17	0
C03	1490,0	C08	0,0	C13	0,0	C18	0,0
T03	10	T08	0	T13	0	T18	0
C04	1490,0	C09	0,0	C14	0,0	C19	0,0
T04	-121	T09	0	T14	0	T19	0
C05	0,0	C10	0,0	C15	0,0	C20	0,0
T05	0	T10	0	T15	0	T20	0

### 6.6.2. PROGRAMA PROGRAMADO N° 2 (para 2 a 5 elementos individuales)

C01	50,0	C06	0,0	C11	0,0	C16	0,0
T01	20	T06	0	T11	0	T16	0
C02	1000,0	C07	0,0	C12	0,0	C17	0,0
T02	120	T07	0	T12	0	T17	0
C03	1490,0	C08	0,0	C13	0,0	C18	0,0
T03	10	T08	0	T13	0	T18	0
C04	1490,0	C09	0,0	C14	0,0	C19	0,0
T04	-121	T09	0	T14	0	T19	0
C05	0,0	C10	0,0	C15	0,0	C20	0,0
T05	0	T10	0	T15	0	T20	0

**6.6.3. PROGRAMA PROGRAMADO N° 40 – PROGRAMA DE DESCONTAMINACION**

C01	50,0	C06	900,0	C11	0,0	C16	0,0
T01	50	T06	-121	T11	0	T16	0
C02	300,0	C07	0,0	C12	0,0	C17	0,0
T02	70	T07	0	T12	0	T17	0
C03	1000,0	C08	0,0	C13	0,0	C18	0,0
T03	180	T08	0	T13	0	T18	0
C04	1620,0	C09	0,0	C14	0,0	C19	0,0
T04	120	T09	0	T14	0	T19	0
C05	1620,0	C10	0,0	C15	0,0	C20	0,0
T05	70	T10	0	T15	0	T20	0



**ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ EL HORNO, SE DEBE REALIZAR UN CICLO DE DESCONTAMINACIÓN COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN:** inicie el programa número 40

Cuando se utilizan diferentes tipos de circonio, circonio de diferentes marcas o circonio con diferentes temperaturas de sinterización (incluso durante ciclos de sinterización separados) puede ser necesario llevar a cabo la **descontaminación regular del horno e.ON sinter fast** utilizando el ciclo programado para este fin (número 40).

**Se recomienda realizar un ciclo de descontaminación con regularidad, y después de un largo período de no utilización o ante los primeros signos de contaminación en el elemento calefactor (marcas blanquecinas).**

**PRECAUCIONES :**

- El **circonio altamente translúcido es muy sensible**, para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada con otros circonios, se recomienda llevar a cabo con mayor frecuencia ciclos de descontaminación.
- En el caso de utilizar **circonio infiltrado de color**, es esencial deshidratar los elementos con una lámpara de infrarrojos o un horno de secado según las instrucciones del fabricante de los colorantes y de los discos de circonio para evitar la contaminación de la cámara de calentamiento de l'e.ON sinter fast.
- Al utilizar diferentes marcas de discos de circonio o diferentes tipos de circonio, **pueden aparecer en el elemento calefactor depósitos blancos (cristales)**. En ese caso, es necesario limpiar la cámara de calentamiento utilizando un producto como el *Nacera Clean\** con el ciclo de descontaminación número 40. Evite utilizar diferentes circonios (marcas o tipos) en el mismo ciclo.
- Durante la realización de un ciclo de descontaminación: **colocar siempre el soporte de cocción sobre la bandeja**.

**CONSEJO:** añadir en un crisol de sinterización circonio blanco partido en trozos pequeños (absorción de contaminantes) o polvos especialmente diseñados para mejorar la eficacia de la descontaminación (por ejemplo, polvo *Nacera Clean\**). **Después de realizar el programa, comprobar el estado de los elementos calefactores:**

- presencia de rastros blanquecinos = cámara aún contaminada: repetir un ciclo de descontaminación;
- elementos calefactores con un aspecto gris brillante = ok: horno listo.

\* *Nacera clean* es una marca registrada.




## 6.7. COLOCAR LOS ELEMENTOS E INICIAR EL CICLO

### 6.7.1. COLOCAR EL SOPORTE DE COCCIÓN

- Al utilizar el horno **colocar siempre el soporte de cocción sobre la bandeja**, incluso para un ciclo de descontaminación.
- Utilizar exclusivamente el soporte de cocción **e.ON sinter fast** UGIN DENTAIRE.
- Antes de utilizar, **comprobar si se encuentra en perfecto estado**: presencia de polvo/suciedad o daños. Limpiar si necesario con un aspirador (*ver capítulo 8*). Si el soporte está dañado o roto/ no utilizar y reemplazar.

### 6.7.2. COLOCAR LOS ELEMENTOS Y EL CRISOL DE SINTERIZACIÓN

- **Depositar las perlas de circonio** en el crisol de cerámica (una capa en el fondo para evitar que los elementos rocen con el fondo).  
*Nota: no exceda de dos capas para que las perlas no salgan del crisol.*
- **Colocar el(los) elemento(s) sobre las perlas en el crisol** (evitar que se toquen).
- **Colocar el crisol sobre el soporte de cocción.**

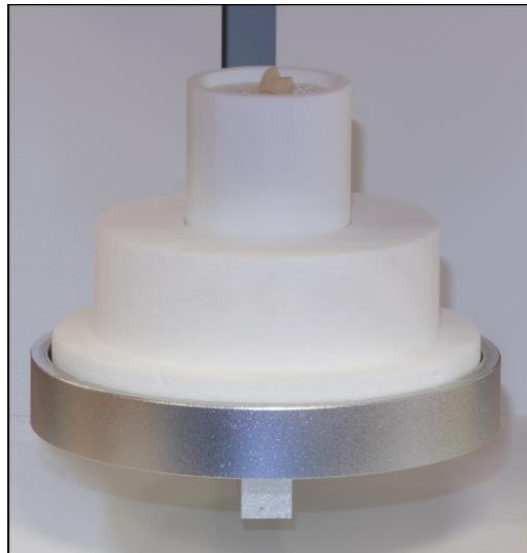

- **capacidad de hasta 5 elementos** (en función del tamaño de los elementos, no deben tocarse).
- en el caso de coloración amarilla de las perlas de circonio, éstas deben ser reemplazadas.
- 



**El crisol de sinterización es muy frágil: evite los golpes.  
Coloque sólo elementos individuales en el crisol (sin puentes).**

### 6.7.3. CIERRE DE LA BANDEJA E INICIO DEL CICLO

Una vez el ciclo seleccionado y programado (*ver capítulos anteriores*):




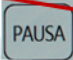

- cerrar la bandeja con la tecla “*flecha hacia arriba*”, e iniciar el ciclo con la tecla “MARCHA”,
- o iniciar el ciclo directamente con la tecla “MARCHA”.

### 6.7.4. SECUENCIA DEL INICIO DEL CICLO

- Inicio del ciclo “MARCHA”: comienza el ascenso de la temperatura según el programa seleccionado,
- la bandeja asciende y permanece cerrada entre 5 y 10 segundos,
- la bandeja baja parcialmente y se mantiene unos 5 minutos,
- la bandeja asciende sin cerrarse completamente,
- cuando la cámara alcanza 500°C, la bandeja asciende y se cierra completamente.

Estos movimientos se realizan **automáticamente**: el usuario no tiene que intervenir.

**IMPORTANTE:** durante los movimientos de la bandeja, **NO PRESIONE LAS TECLAS** (*flecha hacia arriba y abajo, pausa, stop*): **interrupción del ciclo**



*(Note: The buttons PAUSA, STOP, and the arrow buttons are crossed out with a red line in the original image.)*

*Nota: al iniciar el ciclo, el ruido generado por el transformador es normal.*

## 7. CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

### GENERALES

- Durante el funcionamiento y tras utilización, las **superficies externas pueden alcanzar temperaturas elevadas: evitar el contacto** con la piel (*riesgo de quemaduras*).
- El horno está equipado de **extractores mecánicos** para controlar la temperatura y garantizar la seguridad: **no cubra el equipo mientras se utiliza, ni coloque objetos** sobre el horno o en las rejillas de ventilación.

### DESARROLLO Y CONFIGURACION DEL CICLO

- **No abra la bandeja durante los ciclos de alta temperatura:** riesgo de quemaduras y de provocar daños irreversibles en los elementos calefactores y material refractario.
- Al terminar el ciclo, **el horno puede abrirse cuando la temperatura es inferior a 300°C. No desconectar de la red eléctrica**, ya que en este caso los extractores mecánicos se detienen y el aumento de la temperatura interior podría causar daños en el equipo.
- Si la **temperatura supera los 300°C, no se puede iniciar un ciclo** (riesgo de dañar el material refractario). Esperar el enfriamiento del horno: la temperatura indicada en la pantalla debe ser inferior a 300°C.
- Cuando la **temperatura es inferior a 200°C, se puede desconectar de la red eléctrica** con el disyuntor.
- Al terminar el ciclo, el horno pasa automáticamente en **modo de espera (stand-by)**.
- Cuando el **horno se encuentra en modo de espera (stand-by) o apagado, la bandeja debe situarse en la posición superior** para evitar la condensación.
- No toque la pantalla durante un ciclo para evitar la interrupción manual del programa.
- **Al iniciar un ciclo no utilizar una velocidad de ascenso demasiado rápida** para evitar daños en los elementos calefactores. Del mismo modo, **no se recomienda una diferencia significativa entre dos rampas**.
- **Respetar las recomendaciones del fabricante de Circonio** para evitar la formación de emanaciones que pudieran dañar la mufla.
- Al utilizar el horno por la primera vez o después de un periodo sin utilizarlo, es necesario **precalentar** para eliminar la condensación y evitar fracturas del material refractario: **lanzar un programa de descontaminación (nº 40)**.
- Las temperaturas de sinterización proporcionadas por los fabricantes de discos de circonio son indicativas, **se pueden ajustar entre -15°C y hasta +50°C en comparación con la temperatura final recomendada si necesario**.
- **Siga las instrucciones del fabricante del circonio utilizado para comprobar la compatibilidad con la realización de un programa rápido y el número máximo de elementos en ciclo rápido**. Siga sus instrucciones para la programación del ciclo dentro de los límites técnicos del e.ON sinter fast (*el valor de la rampa de temperatura debe ser inferior a 65°C/min hasta 1000°C*).

### ELEMENTOS CALEFACTORES

- El elemento calefactor en Disiliciuro de molibdeno es muy frágil a temperatura ambiente: **evitar su manipulación**.
- El elemento calefactor **no debe mantenerse durante largos períodos entre 400°C y 700°C** para evitar su oxidación.

**SOPORTE DE COCCION** (ver capítulos 6.7.1 – 6.7.2)

- 
- Al utilizar el horno **colocar siempre el soporte de cocción sobre la bandeja.**
  - **Coloque siempre los elementos en el crisol de sinterización, junto con las perlas de circonio.**
  - En el caso de **coloración amarilla de las perlas de circonio**, éstas deben ser reemplazadas.

**PROGRAMA DE DESCONTAMINACION** (ver capítulo 6.6)

- 
- **Antes de utilizar por primera vez el horno es imperativo realizar un ciclo de descontaminación: programa n° 40.**
  - **Durante la realización de un ciclo de descontaminación: colocar siempre el soporte de cocción sobre la bandeja.**
  - Añadir en un recipiente de sinterización con o sin tapa circonio blanco partido en trozos pequeños o polvo *Nacera Clean\** (absorción de contaminantes). **Después de realizar el programa, comprobar el estado del elemento calefactor:**
    - presencia de rastros blanquecinos = cámara aún contaminada: repetir un ciclo de descontaminación;
    - elemento calefactor con un aspecto gris brillante = ok: horno listo.
  - El **circonio altamente translúcido** es muy sensible. Para evitar riesgos de contaminación cruzada con otros circonios: realizar con mayor frecuencia ciclos de descontaminación.
  - En el caso de utilizar **circonio infiltrado de color**, es esencial deshidratar los elementos con una lámpara de infrarrojos o un horno de secado según las instrucciones del fabricante de los colorantes y de los discos de circonio para evitar la contaminación de la cámara de calentamiento de l'**e.ON sinter fast**.
  - Al utilizar diferentes marcas de discos de circonio o diferentes tipos de circonio, **pueden aparecer en los elementos calefactores depósitos blancos (cristales)**. En ese caso, es necesario limpiar la cámara de calentamiento utilizando un producto como el *Nacera Clean\** con el ciclo de descontaminación n° 40.

*Nota: respetar las consignas del capítulo 8 – mantenimiento.*

*\* Nacera clean est una marca registrada.*

## 8. MANTENIMIENTO



**Al realizar tareas de limpieza y/o mantenimiento:**

- **desconectar de la red eléctrica** (*interruptor ON/OFF y desconectar de la red*)



- **dejar enfriar a temperatura ambiente tras utilización** (*riesgo de quemaduras y/o daños materiales*)

Observe las siguientes recomendaciones para garantizar la longevidad del equipo:

- No utilizar productos abrasivos, disolventes o inflamables para su limpieza (exterior e interior).
- Limpiar el exterior con un trapo suave y seco.
- Limpiar las manchas sobre la **pantalla** con un trapo suave con un poco de producto tipo limpia-cristales, o utilizar toallitas para cristales ópticos. No utilice ningún objeto duro o puntiagudo para hacer selecciones en la pantalla táctil (riesgo de provocar daños).
- Retire las perlas, bolitas o trozos de material entre la pantalla y la chapa.
- Si la **cámara de calentamiento** presenta polvo, limpiar con un aspirador - no utilizar aire comprimido.
- Limpiar regularmente la **bandeja** con un aspirador - no utilizar aire comprimido.
- Antes de utilizar, **controlar el estado del soporte de cocción y del crisol de sinterización**.  
Si necesario, limpiar con un aspirador - no utilizar aire comprimido.  
Si está dañado o roto: no utilizar y reemplazar.
- Controlar periódicamente los **contactos eléctricos** de los elementos calefactores y su tensado (cada dos semanas).
- Lubricar periódicamente el carro que mueve la bandeja.




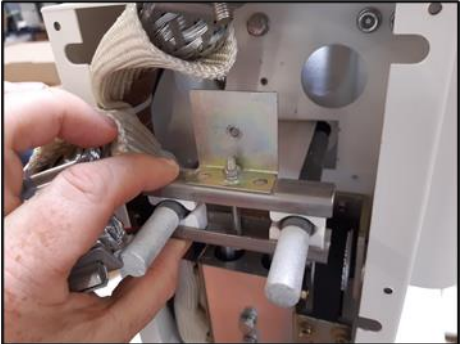
*NOTA: no utilizar aire comprimido para la limpieza: riesgo de dañar los accesorios y de dispersión de partículas del material refractario.*

### 8.1. REMPLAZO DEL ELEMENTO CALEFACTOR

Respetar las siguientes condiciones al realizar la sustitución del elemento calefactor:

- de preferencia, el local debe estar a temperatura ambiente (+15°C/+25°C): el elemento calefactor es muy sensible a la temperatura;
- manejarlo con cuidado;
- conservar todos los elementos: material de protección y elemento calefactor.

▪ **Pasos para realizar el remplazo del elemento calefactor:**

 <p><b>1. Retire el panel trasero del horno (8 tornillos).</b></p>	 <p><b>2. Desenrosque la trenza del elemento calefactor con una llave.</b></p>
 <p><b>3. Afloje el tornillo que sujeta el soporte del elemento calefactor con un destornillador.</b></p>	 <p><b>4. Retirar con cuidado el conjunto del elemento calefactor.</b></p>
<p><b>5. Colocar el nuevo conjunto del elemento calefactor.</b></p>	<p><b>6. Remontar: seguir el orden inverso de las etapas de desmontaje.</b></p>

## 8.2. RESOLUCION DES PROBLEMAS


<i>Problema</i>	<i>Causa</i>	<i>Procedimiento</i>
<b>La pantalla muestra la temperatura 1818.3</b>	Termopar defectuoso ( <i>deteriorado o mal conectado</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No utilizar el horno: riesgo de daños materiales.</li> <li>- Desconectar el horno (<i>interruptor ON/OFF</i>).</li> <li>- Contactar el servicio técnico para reemplazarlo.</li> </ul>
<b>El resultado de la cocción no es satisfactorio</b>	Los parámetros del programa realizado (temperatura/tiempo) no son adecuados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobar los parámetros del programa: temperatura y tiempo.</li> <li>- Ajustar las temperaturas de sinterización si necesario. (<i>ver capítulo 6.4</i>)</li> </ul>
<b>El horno no calienta</b> ( <i>subida de la temperatura</i> )	Es necesario comprobar la continuidad del elemento calefactor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No utilizar el horno: riesgo de daños materiales.</li> <li>- Desconectar el horno (<i>interruptor ON/OFF</i>).</li> <li>- Contactar el servicio técnico para recibir asistencia con el procedimiento.</li> </ul>
<b>Depósitos blancos (cristales) visibles sobre los elementos calefactores</b>	Debido a la utilización de diferentes marcas o tipos de discos de circonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Limpiar la cámara de calentamiento</b> utilizando un producto como el <i>Nacera Clean</i> (marca registrada) y lanzar varios ciclos de descontaminación (n° 40) sucesivos.</li> </ul>
<b>Las perlas de circonio tienen una coloración amarilla</b>	Las perlas están contaminadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Reemplazar con nuevas perlas de circonio.</b></li> </ul>

Si el problema persiste, contacte el servicio técnico.

▪ **Nota - termopar**

El termopar se encuentra bajo el panel superior del horno, y el elemento calefactor se encuentra en la parte posterior.

Al sustituirlo, es muy importante observar el sentido de los cables para poder volver a montarlos de la misma manera con el nuevo termopar.

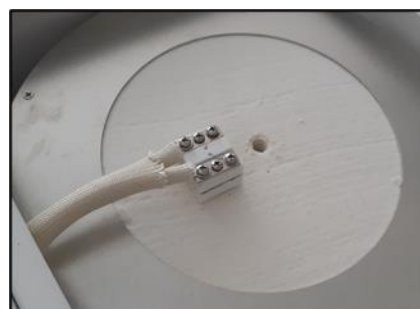



**UGIN DENTAIRE**

25 rue de la Tuilerie • 38170 Seyssinet-Pariset • FRANCE

Tél. : (+33) 4 76 84 45 45 • [info@ugin-dentaire.fr](mailto:info@ugin-dentaire.fr) • [export@ugin-dentaire.fr](mailto:export@ugin-dentaire.fr)

[ugindentaire.fr](http://ugindentaire.fr)  